

МАССАЖЕР МЕДИЦИНСКИЙ НИРВАНА®

АППЛИКАТОР ИГОЛЬЧАТЫЙ

НИРВАНА®

**BRADEx™**  
— Health & Beauty

KZ 0580

Медицинское изделие.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14285 от 12.05.2021 г.

ТУ 32.50.21-001-76456205-2020



Перед началом эксплуатации  
ознакомьтесь с инструкцией

Предназначен для снятия болей и восстановления потери подвижности в мышцах и суставах, в том числе, в пояснице, грудном и шейном отделах позвоночника (остеохондроз, радикулит), релаксации и нормализации сна при бессоннице, используется в условиях ЛПУ и в домашних условиях.

#### ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Снятие болей и потери подвижности в мышцах и суставах, в том числе, в пояснице, грудном и шейном отделах позвоночника (остеохондроз, радикулит).
- Релаксация.
- Нормализация сна при бессоннице.
- Снижение проявлений предменструального синдрома.
- Снижение проявлений климактерического синдрома.
- Снятие головных болей.
- Повышение общего тонуса организма, восстановление и повышение работоспособности.
- Повышение половой активности.
- Улучшение местного кровообращения.
- При плоскостопии.
- Для проведения терапии по зонам Захарьина-Геда.
- Для уменьшения проявлений целлюлита.

#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- Наличие кожных образований, таких как родинки, бородавки или папилломы в зонах применения.
- Наличие тромбофлебита.
- Различные формы дерматоза.
- Диагностирована эпилепсия.
- Высокая температура.
- Воспалительные процессы.
- Беременность.
- Повреждения кожи.

В основе серии товаров НИРВАНА® лежит древнекитайский метод игольчатого массажа для воздействия на активные точки тела. Острые акупунктурные шипы способствуют повышению мышечного тонуса, работоспособности и релаксации.

Ношение акупунктурной повязки особенно рекомендуется при нарушении сна, головных болях, напряжении и сильной утомляемости. Благодаря завязкам аппликатор легко фиксируется на теле на длительное время.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Для локального воздействия на акупунктурные точки разных частей тела: рук, ног, шеи, головы, спины, ягодиц и т. д.
- Способствует улучшению кровообращения, активизации обменных процессов, релаксации и повышению работоспособности.
- Оснащена фиксирующими завязками.
- Натуральные материалы и современный эко-стиль.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Аппликатор является предметом индивидуального использования.

Перед использованием обработайте пластиковые массажные шипы асептическим средством.

Наложите повязку на руку, ногу, поясницу или другую часть тела, плотно зафиксируйте завязками или Регулируйте время самостоятельно, ориентируясь на свои ощущения.

Используйте повязку сначала 5-15 минут, по мере возможности увеличьте время до 30 минут.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:**

Ключевой момент использования изделия – соблюдение гигиены: желательно, чтобы купленный массажер был только вашим, поскольку иглы даже при незначительном давлении могут провоцировать микроповреждение кожных покровов.

### **Еще несколько важных нюансов, как пользоваться изделием:**

С целью минимизации вреда желательно проводить сеанс после опорожнения мочевого пузыря и не раньше, чем через 1,5 после приема пищи.

При сеансе, ориентированном на расслабление, после использования массажера нужно сохранять горизонтальное положение еще полчаса.

Обязательно проветривайте помещение, в котором будет проводиться процедура.

Если у вас есть родинки или бородавки, но в малом количестве, однако вы боитесь их повредить, заклейте их пластырем.

Решать, сколько лежать или использовать массажер, необходимо ориентируясь на рекомендованные врачами цифры: Боли в пояснице, проблемы позвоночника, остеохондроз, нарушения сна, усталость, простатит, сексуальная дисфункция – 15 минут.

Вегето-сосудистая дистония, мигрень, предменструальный синдром – 7-10 минут.

Массажеры предназначены для индивидуального использования.

### **Возможные побочные действия при использовании изделия.**

Возрастных ограничений по использованию аппликатора нет. Единственный возможный нежелательный результат может быть в том случае, если пациент использует массажёр со слишком большим нажимом, из-за чего происходит травмирование кожи (возможны незначительные микроповреждения кожи).

### **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Использовать изделие нужно после еды, не раньше, чем через полтора часа – иначе ускорение кровотока может негативно отразиться на пищеварении, что принесет вред.

Массаж не должен быть слишком долгим – обычно его делают всего по несколько минут с перерывами. Максимальная продолжительность процедуры за один день не превышает часа.

После сеанса домашнего массажа будет полезно принять расслабляющий теплый или контрастный душ для усиления эффекта – польза процедуры.

Внимание! Перед использованием массажера в целях лечения конкретного недуга нужно обязательно проконсультироваться с врачом и узнать, не пойдут ли свойства массажера во вред.

### **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:**

На иголках можно просто лежать, а можно слегка перекачываться по ним большим местом, регулируя силу воздействия – положительные свойства массажа от этого увеличатся.

#### **При остеохондрозе:**

При обострении остеохондроза применять массажер можно с разрешения врача, не больше 4 – 6 раз в день по 7 минут на болезненную область в положении лежа на спине. Если болезнь сопровождается позвоночными грыжами и протрузией, то лучше прижимать аппликатор к телу не более чем на минуту с перерывами по 10 секунд — иначе можно получить вред.

В период ремиссии можно применять устройство по полчаса подряд до 2 раз в день. Это снимет напряжение мышц и уберет воспаления и отеки.

#### **При радикулите:**

Если боли локализуются в поясничном отделе позвоночника, то полезнее всего будет выполнить комплекс упражнений с закрепленным на спине массажером. А именно:

- проделать наклоны корпуса влево и вправо;
- сделать повороты корпуса в левую и правую стороны;
- выполнить легкие потягивания вверх влево и вверх вправо, поочередно поднимая над головой руки.

Внимание! Двигаться нужно очень осторожно, чтобы не причинить себе лишний вред.

#### **При головной боли:**

Свойства массажера помогут снять болевые ощущения в голове, если в течение нескольких минут (5–10) воздействовать им на затылочно-теменную, шейную или височную часть – в зависимости от локализации боли.

#### **При плоскостопии рекомендуется:**

- ходить по массажеру;
- стоять, периодически перенося вес тела с ноги на ногу;
- поворачивать при ходьбе стопы то на внешнюю, то на внутреннюю сторону для полноценного воздействия на мышцы.

#### **При болях в спине и пояснице:**

Даже здоровые люди нередко испытывают дискомфорт в верхней или нижней части спины. При неосторожных движениях или поднятии тяжестей очень легко потянуть мышцы. Массажер с пластиковыми шипами – действенное средство для устранения мышечных болей в области спины.


Применять устройство можно по-разному – например, полежать на нем на протяжении 10–20 минут, или закрепить аппликатор на болевой области и проделать комплекс нехитрых упражнений для мышц спины.

#### При болях в шее:

Массажер при шейном остеохондрозе или при мышечных болях, удобнее всего в виде валика с удобной ручкой. Перекатывая валик с легким надавливанием, можно самостоятельно массировать шею.

При неимении валика можно просто свернуть аппликатор и укладывать на него шею из положения сидя или лежа на несколько минут с перерывами.

#### ЗОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ:

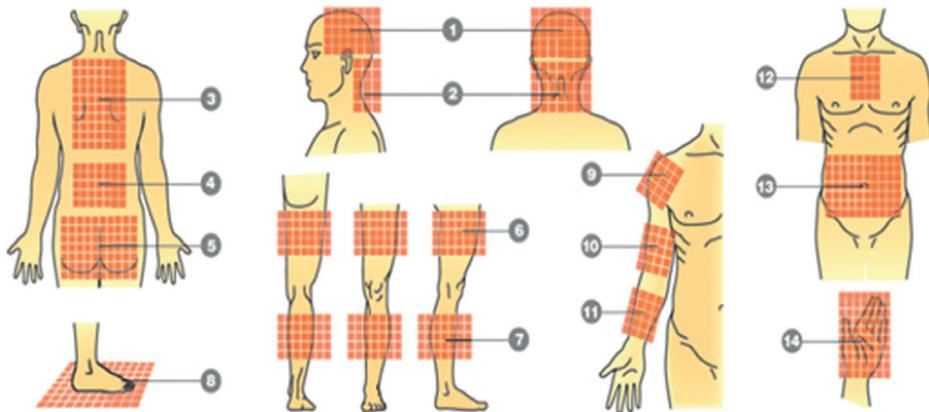

- Снятие болей в мышцах и суставах, включая остеохондроз и радикулит – болевая зона 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11.
- Снятие головных болей – зоны 1, 2, в отдельных случаях 8, 14.
- Повышение эластичности и улучшение тонуса кожи, уменьшение целлюлита и и нежелательных жировых отложений – проблемные зоны 5, 6, 13.
- Повышение общего тонуса организма, восстановление и повышение работоспособности, восстановление после физических нагрузок, нормализация сна – зона 1, 2, 3, 8, 14.
- Повышение половой активности – зоны 4, 8.

#### Регулярный осмотр продукта:

Для более безопасного использования продукта пользователь может проводить регулярный осмотр в соответствии с инструкциями ниже.

#### План технического обслуживания пользователя:

Проверка/калибровка	Период
Внешний вид Проверить наличие физических повреждений шипов	По необходимости

Для безопасной эксплуатации рекомендуется выполнять процедуры технического обслуживания. Для безопасной работы изделия требуется регулярное техническое обслуживание.

#### ЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ:

Инструменты для чистки: чистая вата или губка.

Моющее средство: раствор перекиси водорода с добавлением моющего средства (по МУ 287-113).

Процесс чистки: смочить чистую вату или губку раствором перекиси водорода с моющим средством и почистить внешние части изделия.

Условия эксплуатации для категории исполнения УХЛ 4.2.

#### УХОД:

Допускается стирка чехла руками при температуре не выше 30°C.

Отбеливать запрещено.

Сушить в подвешенном состоянии, не отжимая.

#### ХРАНЕНИЕ:

Хранить в закрытом помещении при температуре от +10 до +35°C и относительной влажности до 70%.

**УТИЛИЗАЦИЯ:**

Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790. По степени опасности отходов – класс А, как эпидемиологические безопасные отходы и утилизируются как бытовые отходы.

Вид медицинского изделия – 120660 (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. № 4н).

Изделие предназначено для многократного использования.

Область применения: в условиях ЛПУ и на дому.

Массажи предназначены для индивидуального использования.

**ТРАНСПОРТИРОВКА:**

Допускается в производственной упаковке.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Аппликатор игольчатый НИРВАНА®.

Материал повязки: 100% хлопок. Материал шипов: АБС-пластик.

Цвет: натуральный хлопок. Цвет шипов: темное золото.

Круглые аппликаторы: 27 игл. Кол-во аппликаторов: 46 шт.

Размер: 140x21x1 см.

Комплектация: аппликатор – 1 шт., инструкция.

Дату производства смотрите на упаковке.

Номер партии: 3815

Средний срок службы 5 лет.

Гарантийный срок годности составляет 36 месяцев с момента изготовления изделия.

**Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.**

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

**Производитель:** ООО «Технологии здоровья», Россия, 117405, Москва, Варшавское ш., д. 145, корп. 8.

**Импортер на территории РФ:** ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

**Импортер на территории Республики Беларусь:**

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

**Страна происхождения:** Китай.

**Место производства:** Neh (Ningbo) Industry & Trade Co., Ltd., No. 13, Xinheng Yi Road, Privately-Operated Industrial Zone, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province, 315035, China.

HEX (Нингбо) Индастри энд Трейд, Лтд., Китай, город Нингбо, провинция Чжэцзян, район Цзянбэй, Ксингхенг Уи Роад, частная промышленная зона, строение № 13, индекс: 315035

**Международная торговая марка «BRADEX».**

Reg.№ 1419183

Израиль - Reg. № 204012

Россия - Reg. № 444287, № 683532

Торговая марка «НИРВАНА». Reg. № 723792