

СИДЕНЬЕ НАСАДКА

ДЛЯ УНИТАЗА СО СЪЕМНЫМИ
ПОРУЧНЯМИ



KZ 0932

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сиденье-насадка для унитаза со съёмными поручнями - универсальное и надежное устройство для добавления высоты посадочному месту. Оно значительно облегчает пользование туалетом пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также в период реабилитации после перенесенных травм, хирургических операций. Такое специализированное сиденье имеет анатомическую конструкцию и оптимальную высоту, а мягкие накладки на поручнях снижают нагрузку на мышцы. Изделие выполнено из прочного, легко моющегося, гипоаллергенного пластика. Опорные съёмные поручни с нескользящими подлокотниками обеспечивают комфорт, уверенность во время использования.

Насадка подходит для унитазов любой формы, плотно фиксируется с помощью специальных креплений без применения каких-либо инструментов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сиденье для унитаза с мягкими нескользящими подлокотниками.
- Быстрая и удобная установка.
- Надежная фиксация.
- Подходит для унитазов любой формы.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.
- Легкость и мобильность в использовании.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните вдали от источников возгорания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Перед использованием убедитесь, что все пружинные кнопки правильно зафиксированы. Ни в коем случае не используйте накладку на унитаз при наличии любых признаков повреждения изделия. Убедитесь, что фиксированные компоненты не повреждены, не изношены и не отсутствуют.

При необходимости замените все недостающие или поврежденные детали.

Регулярно проверяйте, затянуты ли крепежные винты данного изделия. Если они ослабли, зафиксируйте их.

Не превышайте максимально допустимую нагрузку в 150 кг.

Не используйте устройство в иных целях, кроме указанных в инструкции.

Съёмные поручни предназначены исключительно для поддержки во время использования устройства, они не способны выдержать вес всего тела.


Люди с ограниченными физическими возможностями должны пользоваться насадкой-сиденьем под присмотром медперсонала, родственников или воспользоваться съёмными поручнями.

Ни в коем случае не использовать изделие, если оно крепко не зафиксировано на унитазе.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ОПИСАНИЕ:

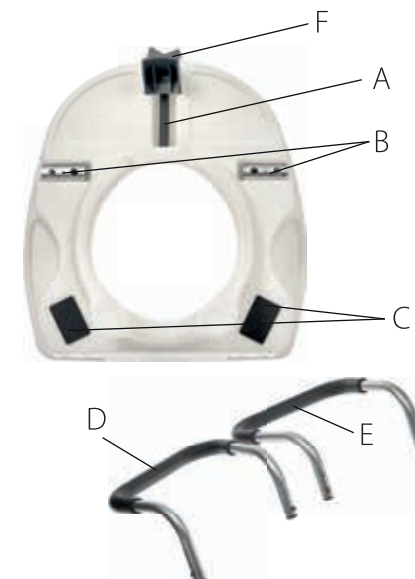

A – механизм для фиксации сиденья к унитазу.

B – трубка для крепления поручней к сиденью, с двумя отверстиями для регулировки расстояния между поручнями от 43 до 49 см.

C – противоскользящая накладка.

D – правый поручень.

E – левый поручень.

F – ручка для регулировки фиксации сиденья к унитазу.



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ:

Для установки сиденья-насадки, снимите с унитаза ранее установленное сиденье.

1. Вставьте правый поручень «D» с меткой «1» в трубку для крепления поручней «B» с такой же меткой «1». Зафиксируйте поручень в одном из двух положений, в зависимости от необходимого расстояния между поручнями от 43 до 49 см.

2. Вставьте левый поручень «E» с меткой «2» в трубку для крепления поручней «B» с такой же меткой «2». Зафиксируйте поручень в одном из двух положений, в зависимости от необходимого расстояния между поручнями от 43 до 49 см.

3. Разместите сиденье строго по центру унитаза, отодвигая изделие как можно дальше назад к бачку унитаза. Поверните регулировочную ручку «F» по часовой стрелке, чтобы механизм для фиксации «A» плотно зафиксировал сиденье к унитазу. Как только почувствуете сопротивление, остановите вращение ручки «F», и убедитесь, что сиденье надежно зафиксировано на унитазе. Прекратите вращение ручки «F», так как это может повредить механизм для фиксации «A».

РУКОВОДСТВО ПО УДАЛЕНИЮ:

1. Поверните регулировочную ручку «F» против часовой стрелки, пока не ослабите фиксацию механизма «A» к унитазу.

2. Возьмите сиденье двумя руками и снимите его с унитаза.



ПРИМЕНЕНИЕ:

Внимание: сиденье-насадка для унитаза может использоваться только для унитаза. Съемные поручни предназначены исключительно для поддержки во время использования устройства.

1. Встаньте спиной к унитазу, наклонитесь к сиденью, коснитесь задней поверхностью ног сиденья, для поддержки возьмитесь за поручни.

2. Медленно опуститесь на сиденье, придерживаясь двумя руками за поручни, займите комфортное положение.

3. Чтобы встать с сиденья, аккуратно подтолкните себя вперед, равномерно опираясь обеими руками на поручни. Убедитесь, что вы держите равновесие, прежде чем разжать руки и убрать их с поручней.

ВАЖНО: всегда перед каждым использованием проверяйте, чтобы сиденье было крепко зафиксировано, а механизм для фиксации сиденья «A» всегда плотно прилегал к унитазу.

Сиденье должно быть ослаблено и снова зафиксировано, по крайней мере, 1 раз в неделю, чтобы проверить состояние изделия и обеспечить его правильную фиксацию.

УХОД И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

Для очищения насадки-сидения пользуйтесь мягким моющим средством и теплой водой, после чего изделие необходимо насухо вытереть. Запрещено использовать органические растворители, такие как ацетон, растворители лака, жидкость для сухой чистки, бензин, скипидар, так как они могут растворить пластик.

Избегать накопления мыльной пены, которая может скользить при попадании на нее влаги.

Всегда проверяйте поручни, чтобы они были сухими. Не используйте моющие средства на основе аммиака, так как они могут ослабить подлокотники или вызывать появление трещин.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: HDPE, алюминий, пластик, ЭВА.

Цвет: белый.

Размер: 51 x 44 x 12 см.

Высота ручки: 26 см.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Комплектация: сиденье насадка – 1 шт., инструкция – 1 шт.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL. Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.

Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья». Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9, комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.

Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.

E-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183.

Израиль - Reg. №204012.

Россия - Reg. №444287, №683532

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Гарантийный срок: 1 год. Срок эксплуатации: 1 год.
Дату производства смотреть на упаковке.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных

ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ



KZ 0536
СТУЛ-СИДЕНЬЕ ДЛЯ
КУПАНИЯ В
ВАННОЙ И ДУШЕ



KZ 0935
СТУЛ-СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ
ДЛЯ КУПАНИЯ В ВАННОЙ И
ДУШЕ