

ВАС ТАКЖЕ МОЖЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ





KZ 0536

Стул-сиденье для
купания в ванной и
душе



KZ 0935

Стул-сиденье со спинкой для
купания в ванной и душе

  BRADEXRUSSIA
  BRADEXMOSCOW

СИДЕНЬЕ НАСАДКА ДЛЯ УНИТАЗА

KZ 0933

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Сиденье-насадка для унитаза - удобное и надежное устройство для увеличения высоты посадочного места, сокращает напряжение мышц при посадке и подъеме. Обеспечивается комфорт при пользовании туалетом пожилым людям, людям с ограниченными физическими возможностями, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также в период реабилитации после перенесенных травм, хирургических операций.

Данная насадка выполнена из износостойкого, легко моющегося пластика с возможностью выдерживать вес до 135 кг. Форма с вырезом оптимального размера. Сиденье-насадка подходит для большинства унитазов, плотно фиксируется с внутренней стороны ободка при помощи выступающего края насадки. Специальных инструментов или навыков для установки изделия не требуется.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобное сиденье-насадка для унитаза
- Быстрая и простая установка без специальных инструментов
- Подходит для большинства унитазов
- Максимальная нагрузка: 135 кг
- Легкость и мобильность в использовании
- Устойчивость к бытовым средствам дезинфекции

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не держитесь за насадку, как за опору, садясь или вставая с нее.

Убедитесь в том, что насадка надежно закреплена перед тем, как сесть на нее.

Инвалиды должны пользоваться насадкой-сиденьем под присмотром медперсонала, родственников.

Устройство подходит для большинства моделей унитазов, но не для всех. Поэтому убедитесь, что данная насадка полностью подходит для вашего унитаза и плотно фиксируется перед использованием.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.



ОПИСАНИЕ:

Сиденье-насадка для унитаза

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

1. Для установки насадки снимите с унитаза стандартный стульчак. Расположите изделие поверх унитаза.
2. Необходимо разместить сиденье по центру унитаза и надавить, чтобы оно плотно прилегло к внутренней стороне ободка. Центр изделия должен обязательно находиться над унитазом.

3. Обеспечьте надежную фиксацию перед использованием. Вес человека, пользующегося насадкой, должен быть сосредоточен строго по центру над сиденьем унитаза, ни дальше, ни ближе к одной из сторон изделия, так как в противном случае оно может сместиться.

4. Максимально допустимая нагрузка сиденья-насадки - 135 кг.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Медленно наклонитесь к сиденью, пока задняя поверхность ваших ног не коснется его.
2. Аккуратно опуститесь на насадку, сгибая ноги в тазобедренном суставе, локтях и коленях.
3. Чтобы встать с сиденья, аккуратно подтолкните себя вперед. Убедитесь, что вы держите равновесие, прежде чем полностью встать.

УХОД И ОЧИСТКА:

Необходимо производить санацию изделия мыльным раствором в горячей воде (температура до 90 градусов).

Неабразивные моющие средства или бытовые средства дезинфекции используйте в теплой воде. После обработки снова сполоснуть в теплой воде и вытереть насухо мягкой тканевой салфеткой.

Запрещено использование абразивных моющих средств, так как это может повредить изделие.


ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: пластик. Размер: 38x38x12 см

Комплектация: насадка-сидение для унитаза – 1 шт., инструкция – 1 шт.

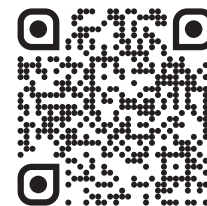

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных для детей и животных

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824,

fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9, комн. 34/4. УНП 192409754.

Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: Дзедзянь Нью Вижн Импорт энд

Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEX».
Per. №1419183.

Израиль - Per. №204012.

Россия - Per. №444287, №683532

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Гарантийный срок: 1 год.

Срок эксплуатации: 1 год.

Дату производства смотреть на упаковке.