

Произведено по заказу «BRADEx» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824,
fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il.

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья».

Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru.

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск,
ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4.

УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай. **Изготовитель:** Джецзянь Нью Вижн Импорт энд
Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com.

Международная торговая марка «BRADEx».

Рег. №1419183.

Израиль - Рег. №204012.

Россия - Рег. №444287, №683532

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

Гарантийный срок: 1 год.

Срок эксплуатации: 1 год.

Дату производства смотреть на упаковке.



Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией



Храните в местах, недоступных
для детей и животных



Служба заботы
о клиентах

СИДЕНЬЕ НАСАДКА ДЛЯ УНИТАЗА С ПОРУЧНЫМИ И КРЫШКОЙ

KZ 0934

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



BRADExRUSSIA

BRADExMOSCOW

Сиденье насадка для унитаза предназначено для людей с ограниченными физическими возможностями во время реабилитации, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или в силу возраста. Эргономичное сиденье большей высоты оборудовано двумя поручнями по бокам для равномерного распределения нагрузки на руки и ноги: с ним гораздо проще садиться и вставать. Высококачественный пластик и надежная стальная конструкция выдерживает вес до 100 кг.

Насадка рекомендована к использованию в домашних условиях, в лечебных организациях, в общественных туалетах для инвалидов. Легко устанавливается при помощи кронштейнов без использования инструментов.

Сиденье нейтрально к санитарной обработке.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Сиденье для унитаза с мягкими подлокотниками и крышкой.
- Улучшенное фиксирующее устройство для большей надежности.
- Инструменты для установки не требуются.
- Подходит для большинства унитазов.
- Легкий и портативный.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните вдали от источников возгорания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Перед применением проверьте правильность установки.

Если какие-то части сиденья повреждены, прекратите эксплуатацию.

Не становитесь ногами на сиденье.

СБОРКА:

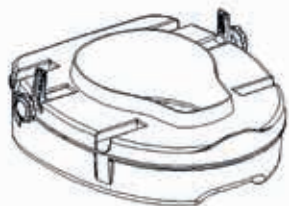


Рисунок 1

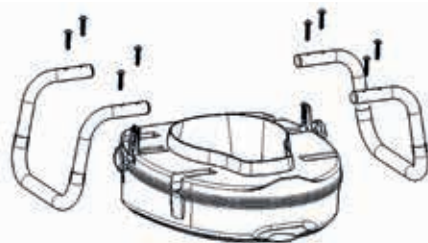


Рисунок 2

Извлеките изделие и крепежные детали из коробки и внимательно прочитайте инструкцию перед установкой сиденья насадки на унитаз.

Снимите сиденье и крышку со своего унитаза.

Поместите регулируемые кронштейны в пазы и поворачивайте по часовой стрелке до тех пор, пока резьба не войдет в зацепление – не затягивайте дальше на этом этапе. Рис. 1.

Вставьте подлокотники в нижнюю часть сиденья и закрепите с помощью восьми винтов. Рис. 2.

Установите сиденье на унитаз.

Убедитесь, что два фиксирующих кронштейна находятся по обе стороны стенки унитаза.

Поверните кронштейны по часовой стрелке до упора. Затяните руками. Не используйте инструменты, так как резьба на регулировочных кронштейнах может сорваться.

Перед использованием изделия регулярно проверяйте его надежное крепление.

Пользователь должен садиться на центр унитаза.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Соберите насадку согласно инструкции.

Удостоверьтесь, что она достаточно устойчива.

Садитесь на центр сиденья, придерживаясь руками за подлокотники сиденья.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ:

При загрязнении промыть губкой с моющим средством, протереть сухой тряпкой.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: АБС-пластик, сталь, ЭВА

Цвет: белый

Размер: 49,4 x 40 x 20,1 см.

Максимальная нагрузка: 100 кг.

Комплектация: сиденье насадка – 1 шт., инструкция.