

ВИДЕО О ТОВАРЕ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ



СТУЛ-СИДЕНЬЕ СО СПИНКОЙ ДЛЯ КУПАНИЯ В ВАННОЙ И ДУШЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ НЕ ИМЕЕТ САНИТАРНОГО ОСНАЩЕНИЯ, ВСТРОЕННОГО ИЛИ СЪЁМНОГО РЕЗЕРВУАРА, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ РЕАБИЛИТАЦИИ.

Произведено по заказу «BRADEx» ISRAEL. Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО "Технологии здоровья", Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Страна происхождения: Китай.

Изготовитель:

Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708.
Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938.
E-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by.
E-mail: info@bradex.by

Международная торговая марка «BRADEx».

Reg. №1419183
Израиль - Reg. №204012
Россия - Reg. №444287, №683532
Гарантийный срок: 1 год.



Дату производства смотрите на упаковке.



Артикул KZ 0935

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стул со спинкой для купания в ванной и душе предназначен людям с ограниченными физическими возможностями в силу возраста или болезни. Эргономичное сиденье оборудовано двумя ручками по бокам и одной ручкой на спинке для удобства переноски. Высококачественный пластик и надежная конструкция выдерживает вес до 150 кг, стул подойдет также для любого роста благодаря регулируемой высоте ножек: от 33 до 50,5 сантиметров. Каркас стула выполнен из прочного и в тоже время легкого алюминия. Спинка облегчает процедуру купания для тех, кому особенно тяжело держать спину самостоятельно. Сиденье оснащено дренажными отверстиями для стока воды. Резиновые накладки на ножках предотвращают скольжение по кафелю или поверхности ванны.

Сиденье рекомендовано к использованию для облегчения принятия водных процедур больным самостоятельно или с помощью других лиц. Сиденье легко моется, материалы нейтральны к санитарной обработке.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Регулируемая высота ножек от 33 до 50,5 см.
- Удобная изогнутая форма сидения.
- Ручки по бокам сиденья.
- Специальные выемки для душевой лейки.
- Спинка с дополнительной ручкой.
- Дренажные отверстия для стока воды.
- Нескользящие резиновые накладки на ножках стула.
- Выдерживает вес до 150 кг.



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

Храните вдали от источников возгорания.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Перед применением проверьте правильность сборки и устойчивость стула.

Проверьте, чтобы все ножки были одной высоты.

Если какие-то части стула повреждены, прекратите эксплуатацию.

Не предназначен для купания грудных детей.


Максимальная нагрузка – 150 кг.

Не позволяйте детям играть со стулом, становиться на сиденье ногами, прыгать или менять высоту ножек.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 сиденье
- 1 спинка
- 4 винта М6х30 мм
- 5 винтов М6х35 мм
- 9 гаек
- 2 опоры сиденья, в собранном виде – 4 ножки
- 2 опоры спинки
- 4 резиновых накладки на ножки
- 4 удлинителя опор с отверстиями
- 4 кнопки-фиксатора высоты ножек

СБОРКА:

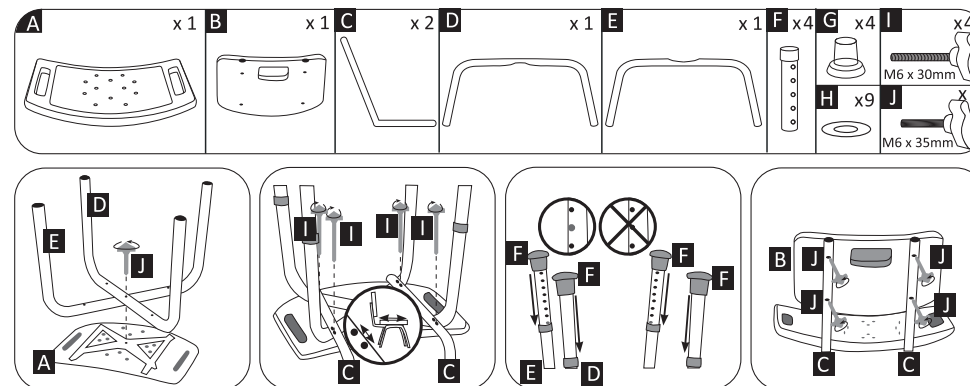

Положите сиденье стороной с углублением в форме X вверх.

Положите нижнюю опору сиденья на основание, сверху положите 2 опоры и зафиксируйте винтом посередине, совместив отверстия.

После этого положите сверху опору сиденья и зафиксируйте всю конструкцию винтами до упора.

Вставьте удлинители опор, совместив кнопки-фиксаторы.

Все ножки должны быть зафиксированы на одном уровне.

Проверьте, чтобы кнопки-фиксаторы входили в отверстия целиком и прочно держали удлинители опор.

Закрепите спинку стула при помощи винтов.

Наденьте резиновые накладки на ножки.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Соберите стул согласно инструкции.

Поставьте стул в ванну или в душевую кабину/под душ.

Удостоверьтесь, что стул достаточно устойчив.

Садитесь в центр стула, при необходимости придерживайте ручки стула руками.

СПОСОБЫ ОЧИСТКИ СТУЛА:

Если стул используется несколькими людьми, после купания необходимо провести санитарную обработку сидения.

При загрязнении промойте губкой с моющим средством, смойте водой.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал: HDPE (полиэтилен), алюминий, резина.

Цвет: белый.

Общий размер: 50,0 x 41,0 x 67,5 / 85,5 см.

Размер сиденья: 49,0 x 29,0 см x 3,2 см.

Размер спинки: 41x16,5x2,5 см.

Высота регулируется от 33 до 50,5 см.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Комплектация: стул-сидение – 1 шт., инструкция.