

200*65mm

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Характеристики:

Набор менструальных чаш Vital Cup, 2 шт. (S+L)
Артикул SX 0051

Материал: медицинский силикон.

Размер:

S: 40 x 70 мм (белая).

L: 42 x 80 мм (розовая).

Комплектация: чаша L – 1 шт., чаша S – 1 шт.,
мешочек для хранения – 1 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091,
Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Техноло-
гии здоровья», Российская Федерация, 117405,
Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8.
Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66,
www.bradex.ru

Многоразовое изделие, срок службы
до 15 лет.

Импортер на территории Республики
Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул.
Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754.
Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.
Страна происхождения: Китай
Изготовитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд
Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная
зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел:
+86-574-6560937, факс: +86-574-6560938
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com
Международная торговая марка «BRADEX».
Reg. №1419183
Израиль - Reg. №204012
Россия - Reg. №444287, №683532

Дату производства смотрите на упаковке.
Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

Товар не подлежит обязательной
сертификации и декларированию

Перед началом эксплуатации
ознакомьтесь с инструкцией

Храните в местах, недоступных
для детей и животных

VITAL CUP

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SX 0051

BRADEX¹⁸



ДВА РАЗМЕРА



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ



КОМФОРТНО



БЕЗ ПРОТЕКАНИЙ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Наличие воспаления, травм, опухолей
влагалища и шейки матки, девствен-
ность.

При наличии внутриматочной спирали
чаши нужно использовать с осторожно-
стью.

О возможных противопоказаниях про-
консультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Установка менструальной чаши

5 минут



1. Перед первым приме-
нением прокипятите мен-
струальную чашу в течение
5 минут.



2. Тщательно вымойте руки
с мылом.



3. Займите удобное поло-
жение, чтобы мышцы
брюшной стенки были мак-
симально расслаблены:
стоя, сидя, присев на кор-
точки или на колени. Рас-
слабьтесь и не торопитесь.



4. Плотно сложите чашу по-
полам, держа ее ободком
вверх.



5. Вставьте менструальную
чашу во влагалище. Изде-
лие должно располагаться
на несколько сантиметров
ниже шейки матки.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ЧАШИ:



1. Тщательно вымойте руки
с мылом.



2. Для извлечения чаши
сядьте на корточки или на
унитаз. Аккуратно сожмите
дно чаши пальцами и мед-
ленно вытяните изделие
наружу.



3. Содержимое вылейте в
унитаз.



4. Чашу вымойте с обы-
чным моющим средством
под теплой проточной
водой.



5. Повторно установите
чашу во влагалище, соглас-
но инструкции выше.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходи-
мо вымыть силиконовое изделие с обы-
чным моющим средством под теплой про-
точной водой.

После каждого цикла прокипятите чашу
и храните ее в специальном тканевом ме-
шочке (входит в комплект) в сухих прохлад-
ных, недоступных для детей местах.
Избегайте попадания прямых солнечных
лучей.

Не используйте чашу при обнаружении
изменения цвета или ее деформации.