

200*65mm

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

Характеристики:

Набор менструальных чаш Clarity Cup, 2 шт. (S+L)

Артикул SX 0052

Материал: медицинский силикон.

Размер:

S - 43 x 74 мм (синяя).

L - 48 x 80 мм (фиолетовая).

Комплектация: чаша S – 1 шт., чаша L – 1 шт., мешочек для хранения – 1 шт., инструкция.

Многоразовое изделие, срок службы до 15 лет.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL. Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059 www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8, 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938

e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Reg. №1419183

Израиль - Reg. №204012

Россия - Reg. №444287, №683532

Дату производства смотрите на упаковке.

Срок эксплуатации: 1 год.

Гарантийный срок: 1 год.

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

Храните в местах, недоступных для детей и животных

CLARITY CUP

BRADEX¹⁸⁺

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ SX 0052



ДВА РАЗМЕРА



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ



КОМФОРТНО



БЕЗ ПРОТЕКАНИЙ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Наличие воспаления, травм, опухолей влагалища и шейки матки, девственность.

При наличии внутриматочной спирали чаши нужно использовать с осторожностью.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Установка менструальной чаши



1. Перед первым применением прокипятите менструальную чашу в течение 5 минут.



2. Тщательно вымойте руки с мылом.



3. Займите удобное положение, чтобы мышцы брюшной стенки были максимально расслаблены: стоя, сидя, присев на корточки или на колени. Расслабьтесь и не торопитесь.



4. Плотно сложите чашу пополам, держа ее ободком вверх.



5. Вставьте менструальную чашу во влагалище. Изделие должно располагаться на несколько сантиметров ниже шейки матки.



ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ЧАШИ:



1. Тщательно вымойте руки с мылом.



2. Для извлечения чаши сядьте на корточки или на унитаз. Аккуратно сожмите дно чаши пальцами и медленно вытяните изделие наружу.



3. Содержимое вылейте в унитаз.



4. Чашу вымойте с обычным моющим средством под теплой проточной водой.



5. Повторно установите чашу во влагалище, согласно инструкции выше.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть силиконовое изделие с обычным моющим средством под теплой проточной водой.

После каждого цикла прокипятите чашу и храните ее в специальном тканевом мешочке (входит в комплект) в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Не используйте чашу при обнаружении изменения цвета или ее деформации.