

200\*65mm

#### ТРАНСПОРТИРОВКА:

Допускается в производственной упаковке.

#### Характеристики:

Менструальная чаша Vital Cup, L, розовая  
Артикул SX 0053  
Материал: медицинский силикон.  
Цвет: розовый.  
Размер: 42 x 80 мм.  
Комплектация: чаша – 1 шт., мешочек для хранения – 1 шт., инструкция.

Менструальная чаша Vital Cup, S, белая  
Артикул SX 0054  
Материал: медицинский силикон.  
Цвет: белый.  
Размер: 40 x 70 мм.  
Комплектация: чаша – 1 шт., мешочек для хранения – 1 шт., инструкция.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.  
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091,  
Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059  
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by. Страна происхождения: Китай  
Изготовитель: Джецзян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.  
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938  
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com  
Международная торговая марка «BRADEX», Рег. №1419183  
Израиль - Рег. №204012  
Россия - Рег. №444287, №683532

Дату производства смотрите на упаковке.  
Срок эксплуатации: 1 год.  
Гарантийный срок: 1 год.


Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию

# VITAL CUP

BRADEX<sup>18+</sup>

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SX 0053  
SX 0054

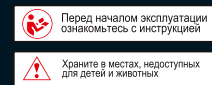

Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией

Храните в местах, недоступных для детей и животных



КОМФОРТНО



БЕЗ ПРОТЕКАНИЙ



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ



#### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Наличие воспаления, травм, опухолей влагалища и шейки матки, девственность.

При наличии внутриматочной спирали чашу нужно использовать с осторожностью.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.  
Товар не является медицинским изделием.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Установка менструальной чашы



5 минут  
1. Перед первым применением прокипятите менструальную чашу в течение 5 минут.

2. Тщательно вымойте руки с мылом.



3. Займите удобное положение, чтобы мышцы брюшной стенки были максимально расслаблены: стоя, сидя, присев на корточки или на колени. Расслабьтесь и не торопитесь.




4. Плотно сложите чашу пополам, держа ее ободком вверх.



5. Вставьте менструальную чашу во влагалище. Изделие должно располагаться на несколько сантиметров ниже шейки матки.



#### ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ЧАШИ:

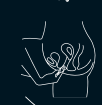

6. После введения чашы внутрь, поверните ее. Она должна раскрыться и создать необходимое заполнение для исключения протекания.

1. Тщательно вымойте руки с мылом.

2. Для извлечения чашы сядьте на корточки или на унитаз. Аккуратно сожмите дно чашы пальцами и медленно вытяните изделие наружу.

3. Содержимое вылейте в унитаз.



4. Чашу вымойте с обычным моющим средством под теплой проточной водой.

5. Повторно установите чашу во влагалище, согласно инструкции выше.

#### ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть силиконовое изделие с обычным моющим средством под теплой проточной водой.

После каждого цикла прокипятите чашу и храните ее в специальном тканевом мешочке (входит в комплект) в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Не используйте чашу при обнаружении изменения цвета или ее деформации.