

200*65mm

ТРАНСПОРТИРОВКА:
Допускается в производственной упаковке.

Характеристики:
Менструальная чаша Clarity Cup, L, розовая
Артикул SX 0055
Материал: медицинский силикон.
Цвет: розовый.
Размер: 80 x 48 мм.
Комплектация: чаша – 1 шт., мешочек для хранения – 1 шт., инструкция.

Менструальная чаша Clarity Cup, S, голубая
Артикул SX 0056
Материал: медицинский силикон.
Цвет: голубой.
Размер: 74 x 43 мм.
Комплектация: чаша – 1 шт., мешочек для хранения – 1 шт., инструкция.
Многоразовое изделие, срок службы до 15 лет.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091,
Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059
www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru


Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажных, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by. Страна происхождения: Китай
Изготовитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.
Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Байтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938
e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com
Международная торговая марка «BRADEX», Рег. №1419183
Израиль - Рег. №204012
Россия - Рег. №444287, №683532
Дату производства смотрите на упаковке.
Срок эксплуатации: 1 год.
Гарантийный срок: 1 год.

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию

CLARITY CUP

BRADEX¹⁸⁺

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
SX 0055
SX 0056

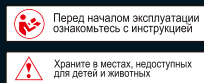

КОМФОРТНО



БЕЗ ПРОТЕКАНИЙ



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ МАТЕРИАЛ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Наличие воспаления, травм, опухолей влагалища и шейки матки, девственность.

При наличии внутриматочной спирали чаши нужно использовать с осторожностью.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
Товар не является медицинским изделием.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Установка менструальной чаши



1. Перед первым применением прокипятите менструальную чашу в течение 5 минут.



2. Тщательно вымойте руки с мылом.



3. Займите удобное положение, чтобы мышцы брюшной стенки были максимально расслаблены: стоя, сидя, присев на корточки или на колени. Расслабьтесь и не торопитесь.



4. Плотно сложите чашу пополам, держа ее ободком вверх.



5. Вставьте менструальную чашу во влагалище. Изделие должно располагаться на несколько сантиметров ниже шейки матки.



6. После введения чаши внутрь, поверните ее. Она должна раскрыться и создать необходимое уплотнение для исключения протекания.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ЧАШИ:



1. Тщательно вымойте руки с мылом.



2. Для извлечения чаши сядьте на корточки или на унитаз. Аккуратно сожмите дно чаши пальцами и медленно вытяните изделие наружу.



3. Содержимое вылейте в унитаз.



4. Чашу вымойте с обычным моющим средством под теплой проточной водой.



5. Повторно установите чашу во влагалище, согласно инструкции выше.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:

После каждого использования необходимо вымыть силиконовое изделие с обычным моющим средством под теплой проточной водой.

После каждого цикла прокипятите чашу и храните ее в специальном тканевом мешочке (входит в комплект) в сухих прохладных, недоступных для детей местах. Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

Не используйте чашу при обнаружении изменения цвета или ее деформации.