

Храните в местах, недоступных для детей и животных

Артикул TD 0335



Перед началом эксплуатации ознакомьтесь с инструкцией!

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С ручкой для ванной «ПОМОЩНИК НЬЮ» Вы оградите себя и Ваших близких от падения на скользкой поверхности ванны или душевой кабины. Также «ПОМОЩНИК НЬЮ» – это надежная и удобная опора, которая будет незаменима для детей и пожилых людей в ванной и туалетной комнате.

Преимущества:

- С легкостью закрепляется на любой гладкой поверхности
- Оснащена присосками с фиксатором
- При установке не требует сверления стен и применения дополнительной фиксации
- Не повредит стены
- Обеспечивает удобную и надежную поддержку
- Устанавливается в любом удобном месте и под любым углом
- Надежность конструкции позволяет многократно перемещать ручку



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:



- Не держайте ручку и не висните, держась за нее
- Не устанавливайте ручку на подвижные поверхности, например раздвижные и распашные двери
- Перед использованием проверьте плотность закрепления ручки на поверхности
- Не устанавливайте ручку на межплиточные швы, рельефную плитку, шероховатые и пористые поверхности: обои и дерево
- Не устанавливайте ручку в местах, где на нее могут падать прямые солнечные лучи

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Выберите поверхность, на которой будет закреплена ручка
- Убедитесь, что на данной поверхности нет дефектов и шероховатостей
- Тщательно очистите и высушите поверхность



Примечание: убедитесь, что на поверхности нет остатков моющих средств, мыла или плесени

- Поднимите фиксаторы присосок
- Плотно прижмите присоски ручки к поверхности
- Опустите фиксаторы



Примечание: убедитесь, что ручка надежно закреплена

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Периодически отсоединяйте ручку от поверхности и прикрепляйте ее заново, чтобы исключить вероятность отсоединения ручки в процессе использования
- Чтобы снять ручку, поднимите фиксаторы и аккуратно отсоедините присоски от поверхности



Примечание: если присоски крепко закреплены на поверхности, приподнимите край присоски пальцем; не используйте для отсоединения острые предметы, чтобы не повредить присоски

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

Регулярно очищайте ручку и присоски при помощи мягкой ткани, смоченной спиртовым раствором или химическими средствами, предназначенными для чистки ванны



Примечание: не используйте абразивные и хлоросодержащие очистители.

Материал: АБС пластик, термопластичная резина.

Комплектация: Ручка – 1 шт., инструкция – 1 шт..

Срок эксплуатации: 1 год.

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.

Trans East Metal Ltd, POB 9101, Haifa 31091, Israel. Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ: ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел.: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь: ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by

Страна происхождения: Китай

Производитель: Джецзянь Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед.

Адрес: Синьцзянь Роуд, 5, Индустриальная зона Бэйтанг, город Нинбо, КНР, 315708. тел: +86-574-6560937,

факс: +86-574-6560938. e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com

Международная торговая марка «BRADEX».

Per.№1419183

Израиль - Per. №204012

Россия - Per. №444287, №683532

ВИДЕО О ТОВАРЕ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ



Дату производства смотреть на упаковке.

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.